



NEUE PERSPEKTIVEN FÜR NATÜRLICHES HÖREN

WIDEX **SMARTRIC**

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



DAS BESTE RIC-HÖRSYSTEM FÜR NATÜRLICHES HÖREN VON WIDEX



Das menschliche Gehör ist ein Wunderwerk der Natur, das Menschen maßgeblich dabei hilft, die Welt zu erschließen. Wir sehen es als unseren Auftrag, Ihnen Hörlösungen an die Hand zu geben, die Menschen mit Hörminderung das Hören in seiner natürlichsten Form wieder zurückbringen.

Widex SmartRIC vereint das Beste von Widex und bietet Ihren Kunden alles, um ihr Leben mit Leichtigkeit genießen zu können: ein faszinierend diskretes Design – vergleichbar mit dem legendären RIC 10-Modell – leistungsstarke Akku-Technologie für maximale Freiheit und eine unvergleichliche Klangqualität.

SmartRIC basiert auf der Moment-Chiptechnologie, die authentischen Zugang zur kompletten Hörwelt ermöglicht sowie natürliches Hören und Verstehen wie keine andere Technologie-Plattform am Markt bietet. Das intelligente winkelförmige Design von SmartRIC eröffnet zusätzliche neue Vorteile für entspanntes Sprachverstehen und mehr Hörkomfort.

Widex SmartRIC erhalten Sie in drei Technologiestufen von der Premium- über die Business-Class bis zum Premium-Economy-Hörsystem.



Widex SmartRIC
MRRLD  

EINE NEUE DESIGNKLASSE MACHT HÖREN SCHÖNER

Widex SmartRIC eröffnet mit seiner einzigartigen L-Form eine völlig neue Design-Kategorie unter den Hörsystemen. Die ergonomische Bauform des Hörsystems ist für nahezu alle Ohren geeignet und schmiegt sich durch ihr besonders schlankes, homogenes Design unauffällig hinter das Ohr.

Der renommierte German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte aus, die in der deutschen und internationalen Design-Landschaft wegweisend sind.



Das Statement der Jury:


„Das Widex SmartRIC-Hörgerät ermöglicht durch seine besondere L-Form eine optimale Platzierung des Mikrofons und damit einhergehend eine bessere Erfassung des Schalls. Das Gerät wirkt sehr modern und hochwertig, ist sympathisch klein, kompakt und leicht und verspricht einen angenehmen Tragekomfort.“



**GERMAN
DESIGN
AWARD
2024**

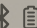

Widex SmartRIC
MRRLD  
mit Ladestation
WPP401




Widex SmartRIC
erhältlich in fünf
modischen Farben

Honey Blonde (114)

Dark Cherry (116)

Rose Gold (153)



„Genau wie unsere audiologische Philosophie des natürlichen Klangs ist unser Design-Ansatz auf eine großartige Benutzererfahrung ausgerichtet. Unser Anspruch ist höchste Qualität, die man nicht nur hören, sondern auch sehen und fühlen kann.“

Martyn Beedham

Senior Design Director, Widex


Silver Grey (119)

Tech Black (118)



INTELLIGENTES DESIGN FÜR MEHR RICHTWIRKUNG

Die einzigartige winkelförmige Bauform ist nicht nur sehr stylisch, sondern bietet auch audiologische Vorteile. Die Mikrofone befinden sich in einem horizontaleren Winkel (20°) als bei anderen Hörgeräten und sind dadurch mehr nach vorn gerichtet. Die optimierte Richtwirkung verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und führt somit zu einer besseren Sprachverständlichkeit in anspruchsvollen Hörsituationen.

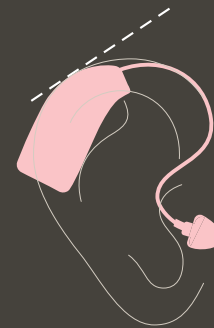

Hörgerät im herkömmlichen Design



Widex SmartRIC

NATÜRLICHER HÖRKOMFORT

Die neu konstruierten flachen Mikrofoneinlässe reduzieren effektiv störende Windgeräusche an den Mikrofonen sowie andere Störgeräusche, z. B. Raschelgeräusche, wenn man mit den Hörgeräten in Berührung kommt. Ihre Kunden profitieren von einem noch natürlicheren Tragekomfort.

Bis zu


20 dB _____

Verbesserung bei Windgeräuschen*

Bis zu

88 % _____

Verbesserung bei
Berührungsgeräuschen*

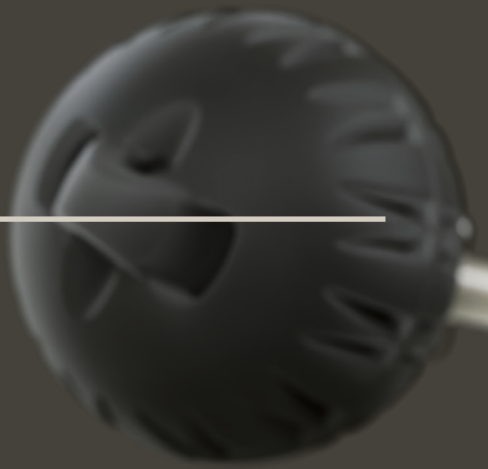

*Quelle: Introducing the Widex SmartRIC: When Design meets Performance (2024). Balling LW, Darula R, Meister B, Parker D, Scheeper P & Tiana-Roig E. Widex Press February 2024, Issue 54.

MEHR FREIHEIT UND FLEXIBILITÄT FÜR EIN AKTIVES LEBEN

Mit Widex SmartRIC erfüllen wir einmal mehr den Kundenwunsch nach einem Hörsystem, das einen so natürlich, diskret und komfortabel im Alltag begleitet, dass man seinen Hörverlust vergisst – und das Leben unbeschwert genießen kann.

Neben dem natürlichen Klang und seiner diskreten Bauform begeistert das Design-Hörsystem SmartRIC mit einer hohen Flexibilität. Die lange Akkulaufzeit von mehr als einem Tag – auch bei einem hohen Streaminganteil – sorgt für Leichtigkeit im Alltag. Die neue mobile Ladestation ist ideal für den komfortablen Einsatz unterwegs und bietet Energie für eine ganze Woche.



Ladestation
WPP401



Widex SmartRIC
MRRD

ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG UND DARÜBER HINAUS:

Nach einer Ladezeit von 4 Stunden bleibt SmartRIC 37 Stunden im Einsatz für natürliches Hören. Selbst bei 8 Stunden Streamingzeit beträgt die Laufzeit mit 27 Stunden mehr als einen Tag. Und wenn es mal schnell gehen muss: Eine halbe Stunde im Ladegerät versorgt die Hörsysteme mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden.

37 37 Stunden ohne Streaming

27 27 Stunden mit 8 Stunden Streaming

Widex SmartRIC
MRRLD mit leistungsfähigem
Akku für eine lange Trage-
dauer und Streamingzeit



KOMFORT TRIFFT LIFESTYLE

Die elegante handliche Ladestation passt fast in jede Tasche und lässt sich mühelos transportieren. Der magnetische Verschluss sorgt für eine einfache und sichere Handhabung.



IDEAL FÜR UNTERWEGS

Die mobile Ladestation stellt 5 Hörsystem-Aufladungen bereit und bietet Energie für eine ganze Woche.

5 5 komplette Ladevorgänge für die Hörsysteme

7 7 Tage Nutzung vor Aufladen des Chargers

SICHERHEIT IM ALLTAG

Die LED-Anzeige gibt Ihren Kunden immer einen guten Überblick über den Ladestatus des Ladegeräts.




DAS BESTE VON WIDEX FÜR NATÜRLICHES HÖREN

Die Genialität des natürlichen Gehörs ist unser Vorbild. Um dem natürlichen Hören nahezukommen, geht Widex andere Wege bei der Hörsystem-Entwicklung: bei der originalgetreuen Erfassung von Eingangssignalen, bei der Präzision in der Klangabgabe an das individuelle Ohr und bei der Signalverarbeitung. So verwendet Widex z. B. als einziger Hersteller eine Zeitbereichs-Filterbank. Diese ist in der Lage, die Funktionsweise des menschlichen Ohrs nachzuahmen, und verbessert die Klangqualität erheblich.

Einzigartige Widex-Schlüsseltechnologien auf Basis der Widex Moment-Chipplattform machen auch das Design-Hörsystem SmartRIC zum Klangwunder für natürliches Hören.


Branchenweit schnellste Klangverarbeitung

Die PureSound-Verarbeitung ist 10-mal schneller als die Signalverarbeitung anderer Premium-Hörsysteme. Durch die geringen Durchlaufzeiten von unter 0,5 ms ist es uns gelungen, verzerrungsbedingte Artefakte bei offenen Versorgungen zu eliminieren und damit ein natürliches Klangbild zu gewähren. PureSound optimiert auch das klare Sprachverstehen sowie die räumliche Wahrnehmung.

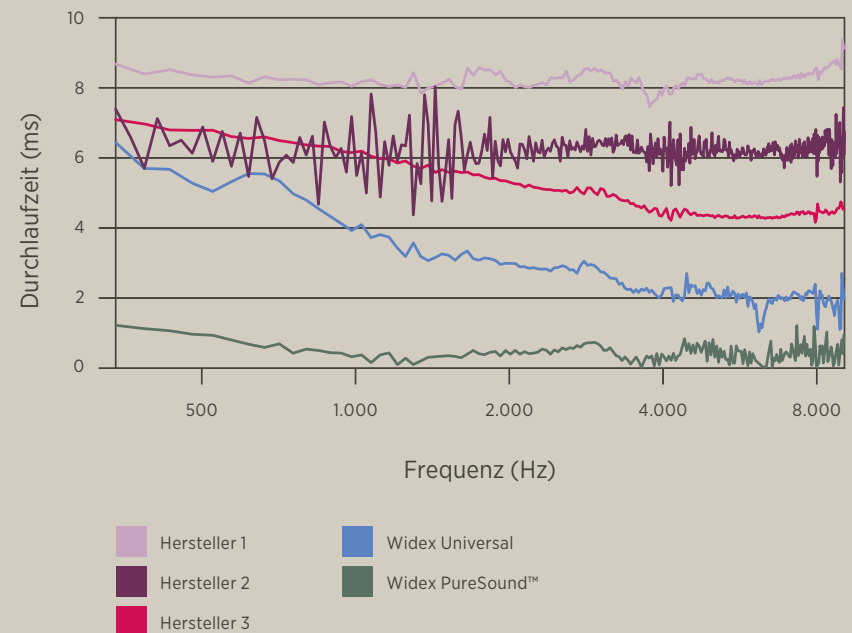

Natürlicher Zugang zu allen Klängen

Widex verwendet die branchenweit höchste Abtastrate und die größte lineare Eingangsdynamik von 5 dB bis 113 dB SPL und macht damit die gesamte Hörwelt authentisch wahrnehmbar. Durch die Hörbarkeit leiser Sprachanteile wird auch das Sprachverstehen unterstützt. Die Verarbeitung leiser Eingangssignale führt zu einer einzigartigen Hörweite, die es so nur bei Widex gibt.

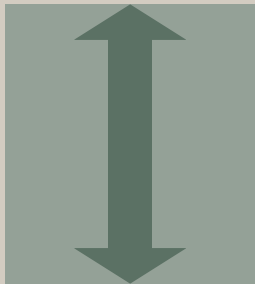

Widex
Zugang zu leisen Tönen




Limitierter Zugang
zu leisen Tönen






Maximale Individualität für natürliches Hören

Das beste Klangerlebnis beginnt mit der präzisen Anpassung des Hörsystems an das individuelle Ohr. TruAcoustics steht für höchste Präzision bei der Klangabgabe und betrachtet dabei Parameter der akustischen Ankopplung und des individuellen Gehörgangs. TruAcoustics verhilft gleichzeitig zu einer angenehmen Empfindung der eigenen Stimme sowie einer Reduktion von Halleffekten.

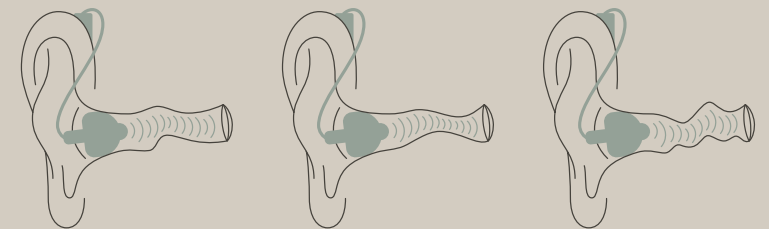


Klangindividualisierung per Smartphone-App

My Sound erlaubt Nutzern die präzise KI-basierte Individualisierung des Klangerlebnisses und reduziert Ihren Zeitaufwand in der Feinanpassung. Endanwender können auf den Equalizer Einfluss nehmen. Zusätzlich wird das Kompressionssystem optimiert, um den Fokus auf nahe und ferne Geräusche zu beeinflussen. Die Verstärkungsanpassung bleibt hiervon unberührt.

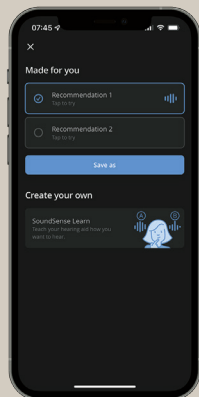

Natürliches Sprachverstehen in lauter Umgebung

Durch die exakte Bestimmung der Sprach- und Störschall-Anteile mittels der Echtzeit-Analyse wird sichergestellt, dass Sprachinhalte mit der Sprachhervorhebung nach SII zuverlässig angehoben werden, während in anderen Frequenzbändern auftretender Störschall auf ein Niveau unterhalb der Hörschwelle des Nutzers reduziert wird. Der Hörsystem-Träger erlebt seine Hörumgebung natürlich und profitiert gleichzeitig von klarem Sprachverstehen.

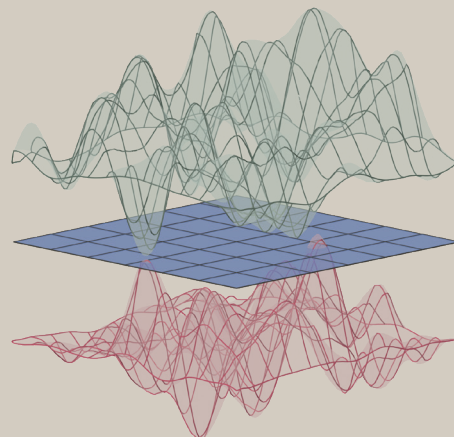

Müheloses Hören in jeder Situation


Die nahtlose automatische Einstellung der adaptiven Parameter auf die jeweilige Hörumgebung mittels der Sound-Class-Technologie verhilft Ihren Kunden zu einem mühelosen Hören in jeder Hörsituation. Sie profitieren bei der Anpassung von der Möglichkeit, die Hörsysteme abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden schnell und zielgerichtet zu individualisieren.



DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MEHR HÖRGENUSS UND KOMFORT


Anpassbereich

Widex SmartRIC
mit V.2 RIC-Hörer M

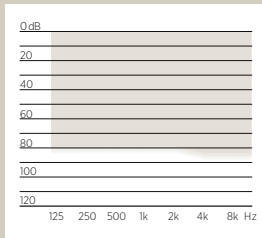

V max. 71 dB
LA max. 128 dB SPL

Widex SmartRIC
mit V.2 RIC-Hörer P

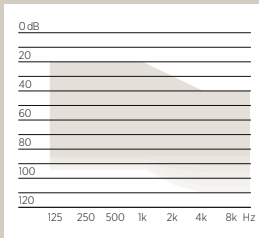

V max. 71 dB
LA max. 133 dB SPL

Widex SmartRIC

Das Design-Hörsystem mit leistungsfähigem Akku für eine lange Tragedauer und Streamingzeit

37 37 Stunden
ohne Streaming

27 27 Stunden mit
8 Stunden Streaming

Widex SmartRIC
Bluetooth MRRLD



Mobile Ladestation

Ideal für komfortables Laden von unterwegs

- Schlankes, elegantes Design
- Mit integrierter Powerbank
- Auch geeignet für induktives Laden per Qi-Ladepad
- USB-C-Anschluss
- 3 LEDs für Akkustatus
- Magnetischer Verschluss

5 5 komplette Ladevorgänge
für die Hörsysteme

7 7 Tage Nutzung vor Aufladen
der Ladestation



Ladestation
WPP401


Widex Moment-App

Widex SmartRIC ist kompatibel mit der intuitiven Moment-App für iOS- und Android-Geräte. Die App bietet wertvolle Funktionen zur Steuerung der Hörsysteme. Sie ermöglicht eine schnelle, einfache Individualisierung des Hörsystem-Klangs mit My Sound sowie direktes Streaming von Musik, Video sowie Anrufen von streamingfähigen Smartphones – und vieles mehr.



Großartiger Klang für jeden Fernsehmoment

- Brillante Audioübertragung per Bluetooth in die Hörsysteme
- Dual-Antennentechnologie für maximale Übertragungsstabilität
- Einfache Bedienung und Installation
- Attraktives, diskretes Design
- Komfortabel über die RC-DEX oder per Moment-App steuerbar
- Klangindividualisierung über My Sound mit der Moment-App

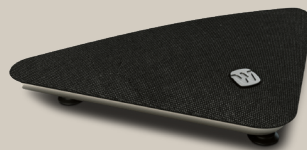

Sound Assist

Das 6-in-1-Bluetooth-Multimikrofon

- Partnermikrofon
- Tischmikrofon
- Integrierte Telespule für induktiven Empfang, z. B. bei Veranstaltungen, im Theater oder in der Kirche
- Hands-Free-Telefonie
- Audioübertragung von jedem Bluetooth-Gerät, z. B. Smartphone, Laptop, Musikanlage
- Fernbedienungsfunktion für das Hörsystem



SoundConnect

Smarte Audioübertragung vom PC

- Brillante Audioübertragung per Bluetooth in die Hörsysteme
- Mehr Hörkomfort bei verschiedenen PC- und Laptop-Anwendungen, z. B. Videogespräche über Skype oder Zoom, Musik hören, Filme und Serien anschauen
- Attraktives Design in kleiner, diskreter Baugröße
- Schnell und einfach einsatzbereit ohne PC-Einstellungen
- Komfortabel per Moment-App steuerbar



Widex SmartRIC ist auch mit der Zubehörlinie Widex DEX kompatibel.



SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de

