



TONELINK™ APP
**KURZ-
ANLEITUNG**
Für alle WIDEX **MOMENT™** Modelle

WIDEX MOMENT™
THIS SOUND CHANGES EVERYTHING





ERSTE SCHRITTE

Die TONELINK™ App wurde für alle WIDEX **MOMENT™** Hörsysteme entworfen und kann mit Apple- und Android-Handys verbunden werden.

Laden Sie die TONELINK™ App aus dem App Store oder Google Play herunter.

FUNKTIONS- WEISE

Die TONELINK™ App verwendet die Lautsprecher Ihres Smartphones, um mithilfe von Hochfrequenzklängen Anweisungen an Ihre Hörsysteme zu schicken.

Bei der ersten Verwendung der App müssen Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem Smartphone koppeln. Führen Sie diese Schritte aus und beachten Sie, dass Sie unter Umständen die Lautstärke Ihres Smartphones in dem Prozess anpassen müssen.

KOPPLUNG VON **TONELINK™** MIT IHREM SMARTPHONE

1. Öffnen Sie die TONELINK™ App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Suchen Sie nach dem QR-Code in der Benutzeranleitung Ihres Hörsystems, falls Sie eine von Ihrem Hörakustiker erhalten haben und scannen Sie den Code. Wenn nicht, drücken Sie **Überspringen**.
3. Starten Sie Ihre Hörsysteme neu, indem Sie sie ausschalten und erneut einschalten. Setzen Sie danach die Geräte wieder ein.
4. Koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem Smartphone, indem Sie auf **Koppeln** drücken.
5. Wenn Sie einen Klang in Ihren Hörsystemen hören, drücken Sie **Ja**.
6. Wenn Sie keinen Klang in Ihren Hörsystemen hören, drücken Sie **Nein**. Passen Sie als nächstes die Lautstärke auf Ihrem Smartphone an und drücken Sie erneut **Koppeln**.

Die TONELINK™ App hilft Ihnen, zwischen Programmen zu wechseln. Durch das Scannen des QR-Codes aus der Benutzeranleitung für das Hörsystem, kann die App die Programme anzeigen, die speziell für Sie ausgewählt wurden.

TONELINK™

APP START- BILDSCHIRM

Menü

Änderungen
zurücksetzen

Frequenzlautstärke

In-App Hilfe

Programmwechsel
und Fokusrichtung

Stummschaltung und
Lautstärkeregelung





EINFACHE STEUERUNG WICHTIGER FUNKTIONEN

Mit TONELINK™ können Sie Folgendes einfach ausführen:

- Programme wechseln
- Lautstärke einstellen
- Stummschaltung aktivieren
- Fokusrichtung ändern

WEITERE INFORMATIONEN

www.global.widex.com/tonelink-app

IST IHR SMARTPHONE KOMPATIBEL?

www.global.widex.com/compatibility

MÖCHTEN SIE TIPPS ODER MEHR ÜBER HÖRMINDERUNG ERFAHREN?

www.global.widex.com/blog



Gedruckt 2020-01. 9 502 5402 002 #01
Widex und WIDEX MOMENT sind Warenzeichen der Widex A/S.



WIDEX A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngø

Apple und das Apple-Logo sind Waren der Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. App Store ist eine Service-Marke der Apple Inc. Android ist ein Warenzeichen der Google Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Warenzeichen von Google Inc.